


ДЖГУТ КРОВОСПИННИЙ «Дніпро»

ТУ 32.5-34228792-001:2022

DN PRO

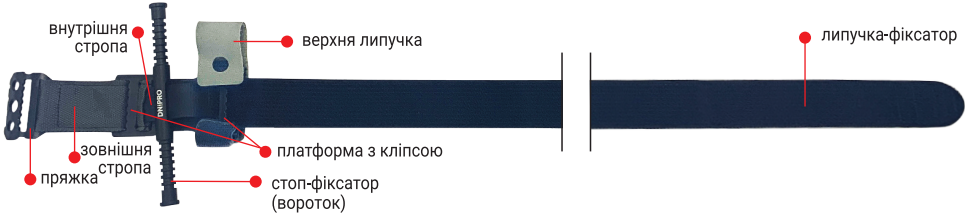

Назва медичного виробу:

Джгут кровоспинний « Дніпро »
генерація 2
*далі джгут

Склад та опис виробу:

Джгут кровоспинний складається з:

- металевої пряжки з насічками для надійної фіксації стрічки;
- зовнішньої та внутрішньої стропи з синтетичного волокна;
- металевого стоп-фіксатора (воротка), здатного витримувати екстремальні фізичні навантаження;
- платформи з кліпсою з міцного, але гнучкого пластику;
- верхньої липучки з синтетичного волокна, яка фіксує інформацію про час накладання джгута;
- липучки-фіксатора з синтетичного волокна, яка дозволяє надійно зафіксувати стропу в необхідному стані.

Цільове призначення:

Для надання першої медичної допомоги у медичних установах, каретах швидкої допомоги, похідних умовах, під час воєнних дій, у побуті, надзвичайних ситуаціях та інших екстремальних ситуаціях для зупинення критичних кровотеч з верхніх та нижніх кінцівок.

Застереження:

Повторно не використовувати. Використовувати згідно інструкції із застосування.

Термін придатності:

3 роки з дати виготовлення. Після розпакування зберігати в закритій аптечці або підсумку.

LOT



турнікет «Дніпро»
генерація 2
Патент України №151561
та РСТ/UA2022/000041
РСТ/UA2022/000064



ТОВ «ВК ПРОСТІР»
49019, Україна, м. Дніпро,
вул. Академіка
Белелюбського, буд. 68.

PARAMEDYK UI
вул. Соляна, 2
05-270 м. Маркі
Польща

EC REP




сайт: www.tqdnipro.com
електронна адреса: priem@prostir-e.com
Інструкція актуалізована 01.11.2022р.





ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ВИРОБУ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

1

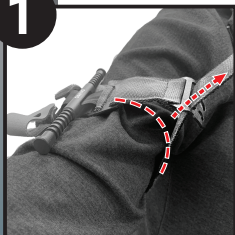

Розгорніть складений джгут. Одягніть утворену петлю на поранену кінцівку. Розмістіть джгут якомога вище місця поранення та перпендикулярно до кінцівки.

2

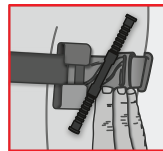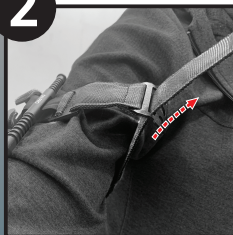

Якомога щільніше затягніть джгут навколо кінцівки, зафіксуйте липучку, притиснувши верхню до

нижньої. Якщо кінчики трьох пальців просуваються під джгут, щільніше затягніть та закріпіть його. ***При нещільному накладанні першого оберту джгута та неміцному притисканні липучки-фіксатора, справна робота виробу не гарантується.**

3



Поверніть декілька разів стоп-фіксатор (вороток), до того моменту, доки не припиниться кровотеча в пораненій кінцівці та не перестане відчуватися пульс. Напрямок обертання стоп-фіксатора (воротка) значення не має.

***Для перекриття критичної кровотечі рекомендовано: на верхніх кінцівках - до 3-х півобертів, на нижніх - до 4-х півобертів.**

4




Закріпіть стоп-фіксатор (вороток) у фіксуючу кліпсу. Перевірте на наявність кровотечі та пульсу. Якщо кровотеча не припинилась або відчувається пульс, зробіть ще напівоберт стоп-фіксатора (воротка) або накладіть другий джгут вище та поряд з першим. Перевірте кровотечу та пульс наново.

5



Вільний кінець джгута закріпіть над стоп-фіксатором (воротком) між кліпсами та прикріпити верхню липучку до кліпси поверх джгута.

6

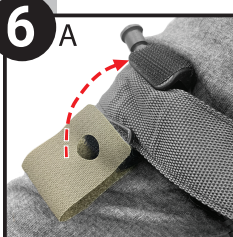

Після фіксації верхньої липучки на кліпсі напишіть на ній час накладання джгута.

ВИКОРИСТАННЯ ДЖГУТА БІЛЬШЕ 2-х ГОДИН МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕЗВОРОТНОГО НЕВРОЛОГІЧНОГО АБО М'ЯЗОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ.

Код партії	Дата виготовлення	Користуватися інструкцією із застосування
Виробник	Уповноважений представник в Європейському Співтоваристві	Повторно не використовувати
Зберігати в сухому місці	Захищати від сонячного світла	

У РАЗІ ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВНА РОБОТА ВИРОБУ НЕ ГАРАНТУЄТЬСЯ.